


ROHO QUADTRO SELECT

Priporočljivo je, da blazino namestite z uporabo atmosferskega tlaka. Navodila za namestitev vas vodijo skozi potrebne korake, da boste blazino pravilno pripravili za uporabo. Blazina bo razbremenila pritisk in hkrati nudila udobno sedenje.

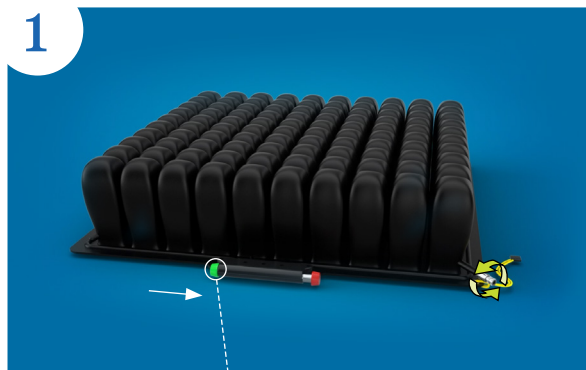

Pritisnite zeleni gumb in odprite ventil.



Z ročno tlačilko napolnite celice, da se blazina rahlo izboči.



Odstranite ročno tlačilko. Ne zapirajte ventila. Dovolite izpust zraka iz blazine.



Poslušajte ali z roko otipajte, kdaj se izpust zraka ustavi.



Zaprite ventil.




Blazino položite na sedišče in se presedite nanjo.




ROHO QUADTRO SELECT


Preverjanje z roko je potrebno izvajati redno.

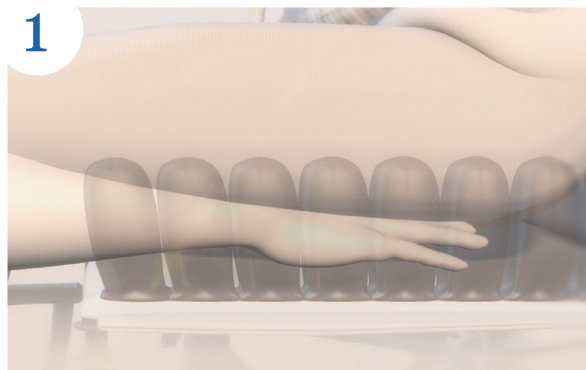


Vstavite roko med blazino in uporabnika, dokler ne dosežete njegovega najnižjega dela sednih kosti.

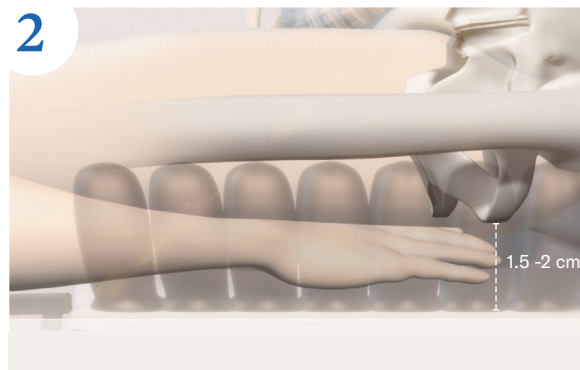


Količino zraka v blazini preverite s premikanjem prstov. Med najnižjim delom sednih kosti in sediščem mora biti 1,5–2,5 cm zraka.

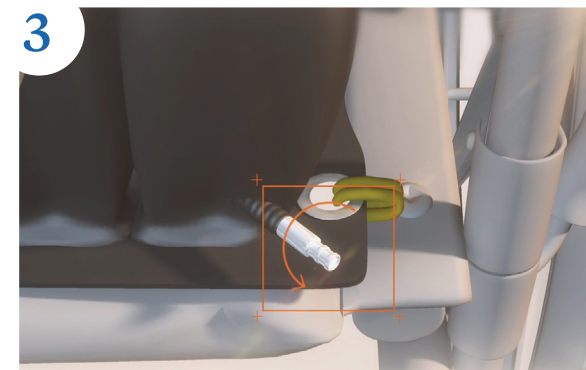

Po potrebi, s priloženo ročno tlačilko, zagotovite optimalno ugreznjenost v material in obdanost s celicami z dodajanjem ali odstranjevanjem zraka.

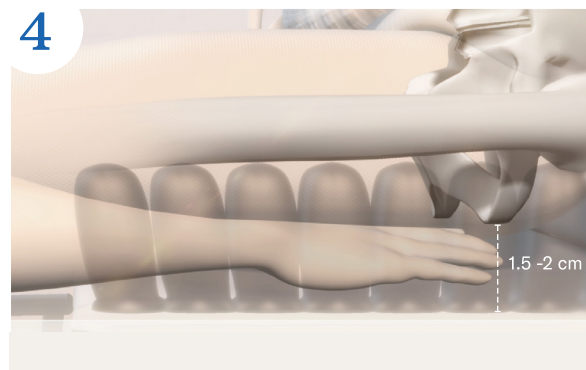

Ponovno preverite, da je med najnižjim delom sednih kosti uporabnika in sediščem 1,5–2,5 cm zraka.

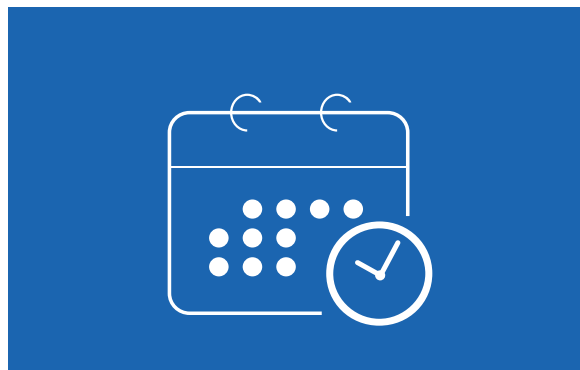

Redno preverjajte količino zraka v blazini.



Za vrhunsko izkušnjo sedenja še naprej uporabljajte blazino ROHO.